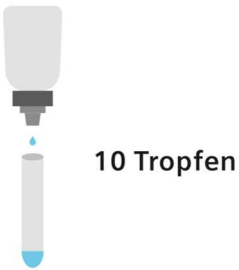
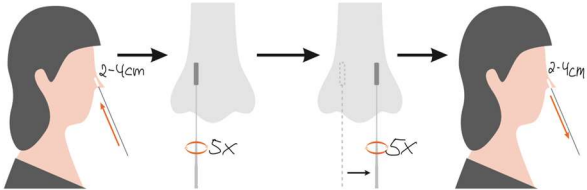
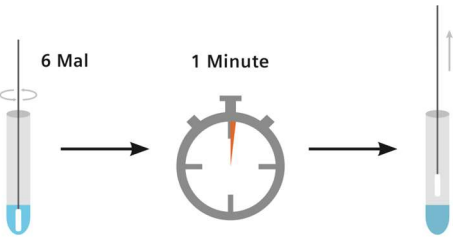

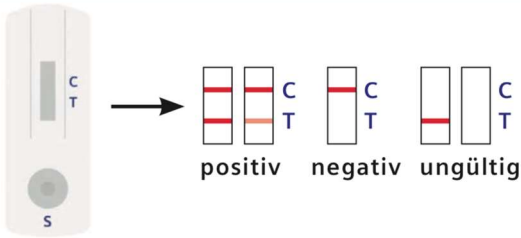


Corona-Selbsttest in der Schule

Abbildung	Anleitung
	<p>Vorbereiten der Utensilien und Bereitlegen des Materials:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lege ein Tempo als Unterlage aus. • Packe die Testkassette aus, öffne den Tupfer am Stielende, stecke das Röhrchen in deine Halterung (Wäscheklammer o.Ä.) • Tropfe <u>exakt 10 Tropfen Pufferlösung</u> in das Röhrchen. <ul style="list-style-type: none"> ○ Bei weniger Tropfen ist der Test evtl. nicht gültig, 1-2 Tropfen mehr sind nicht so schlimm. ○ Hautkontakt unbedingt vermeiden; sonst gut waschen!
	<p>Probenentnahme: Streiche mit dem Tupfer nun beide Nasenlöcher ab (Putze dir vorher bitte nicht die Nase -> Ansteckungsgefahr!!!)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ziehe die Maske nur für diesen Moment NUR UNTER DIE NASE. • Streiche mit demselben Stäbchen jedes Nasenloch 5x im Kreis ab. Der Tupfer sollte sich 2-4cm tief in der Nase befinden. • Ziehe die Maske wieder hoch. • Stelle den Tupfer in die Pufferlösung.
	<p>Lösung zubereiten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rolle den Tupfer in der Lösung mind. 6x am Rand entlang und drücke den Tupfer-Kopf gegen den Boden (Röhrchen nicht schütteln!). • Stelle dir einen Timer oder sieh auf die Uhr: lasse den Tupfer <u>exakt eine Minute</u> in der Lösung stehen! • Drücke das Röhrchen zusammen, um so viel Probenlösung wie möglich aus dem Stäbchen zu lösen. <p>Lege den Tupfer auf dem Tempo ab.</p>
	<p>Setze nun die Kappe auf das Röhrchen (sitzt sie fest?) und tropfe exakt 4 Tropfen in die Probenvertiefung der Testkassette.</p>
	<p>Im Klassenraum: Lege die Testkassette beiseite und lies sie nach exakt 15 Minuten ab.</p> <p>Im Testzentrum: Schreibe deinen Namen und die Uhrzeit auf den Post-It, warte bis der Kontrollstreifen (C auf der Testkassette) sichtbar ist und gib die Kassette beim Lehrer ab.</p> <p>Entsorge anschließend alles im dafür bereit gestellten Mülleimer.</p>